


สวิทช์ฉุกเฉิน Emergency Switch

ใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องผู้ป่วย, ห้องน้ำผู้พิการ, ห้องน้ำผู้ป่วย

PP500
Sub Station

PP500

70 mm.

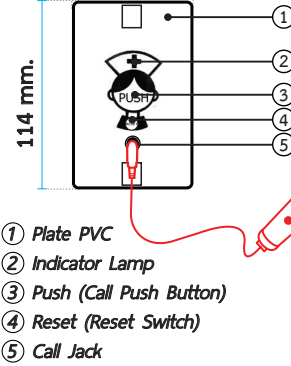Handy BOX
Surface BOX
2" X 4"
36 X 102 mm.

- Emergency Switch with Call Jack PP500 for Call Cord **PP40** (A)

PP500 Sub Station, สวิทช์ฉุกเฉิน Emergency Switch พร้อมขั้วต่อสำหรับสายกดเรียก


หน้าที่การทำงาน

1. Plate PVC : ทำจากพลาสติก สีเทาฟ้า
2. Indicator Lamp : LED โชน์การทำงาน
3. Push (Call Push Button) : ปุ่มกดเรียกขอความช่วยเหลือ, ปุ่มกดเรียกพยาบาล
4. Reset (Reset Switch) : สวิทช์สำหรับยกเลิกการทำงาน
5. Call jack : ช่องสำหรับสายกดเรียกพยาบาล
6. PP500 ใช้กับแรงดันไฟ 24 VDC


รายละเอียด

1. สามารถกดเรียกที่ Push เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ เรียกพยาบาล พร้อมทั้งสามารถเรียกจากสายกด เพื่อเรียกขอความช่วยเหลือ
2. ไฟ LED สีแดง ติดสว่าง โชน์การทำงาน
3. สามารถยกเลิกการทำงานได้จากการกดสวิทช์ Reset
4. สามารถต่อโคมไฟ Corridor Light
5. ขนาด 70 X 114 X 25 mm.
6. ใช้ร่วมกับชุดควบคุม COMMAX, Nurse Call System Master Station JNS12-72

WIRING DIAGRAM

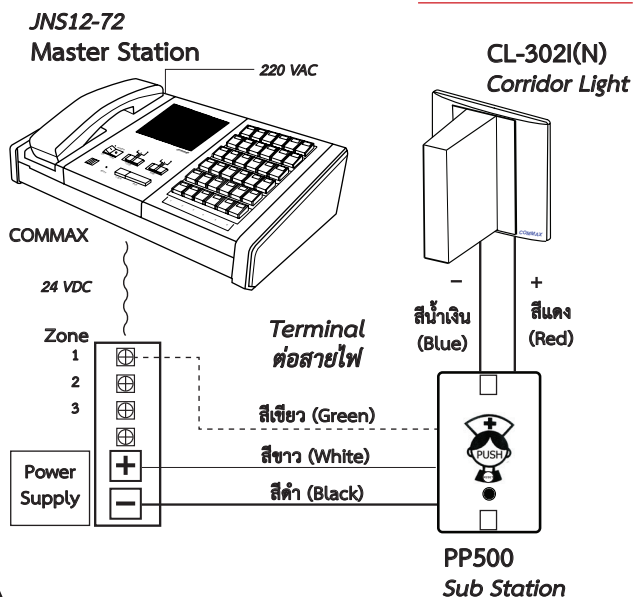

การติดตั้งอุปกรณ์ PP500

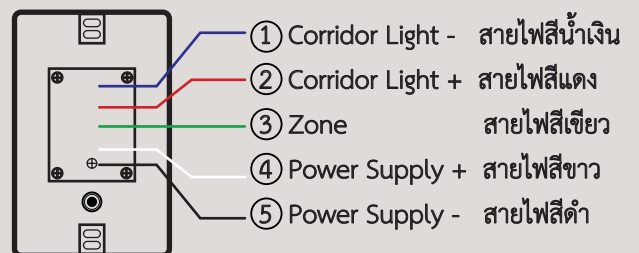

- ① สายไฟสีน้ำเงิน สำหรับต่อ Corridor Light -
- ② สายไฟสีแดง สำหรับต่อ Corridor Light +
- ③ สายไฟสีเขียว สำหรับต่อ Zone
- ④ สายไฟสีขาว สำหรับต่อ +
- ⑤ สายไฟสีดำ สำหรับต่อ -