

สวิตช์ฉุกเฉิน Emergency Switch

ใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องผู้ป่วย, ห้องนำผู้พิการ, ห้องนำผู้ป่วย


PP500
Sub Station

PP500

70 mm.

114 mm.

- ① Plate PVC
- ② Indicator Lamp
- ③ Push (Call Push Button)
- ④ Reset (Reset Switch)
- ⑤ Call Jack

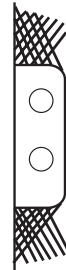

Handy BOX
Surface BOX
2" X 4"
36 X 102 mm.

- Emergency Switch with Call Jack PP500 for Call Cord PP40 (A)

PP500 Sub Station, สวิตช์ฉุกเฉิน Emergency Switch พร้อมขั้วต่อสำหรับสายกดเรียก


หน้าที่การทำงาน

1. Plate PVC : ทำจากพลาสติก สีเทาฟ้า
2. Indicator Lamp : LED โฉว์การทำงาน
3. Push (Call Push Button) : ปุ่มกดเรียกขอความช่วยเหลือ, ปุ่มกดเรียกพยาบาล
4. Reset (Reset Switch) : สวิตช์สำหรับยกเลิกการทำงาน
5. Call jack : ช่องสำหรับสายกดเรียกพยาบาล
6. PP500 ใช้กับแรงดันไฟ 24 VDC


รายละเอียด

1. สามารถกดเรียกที่ Push เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ เรียกพยาบาล พร้อมทั้งสามารถเรียกจากสายกด เพื่อเรียกขอความช่วยเหลือ
2. ไฟ LED สีแดง ติดสว่าง โฉว์การทำงาน
3. สามารถยกเลิกการทำงานได้จากการกดสวิตช์ Reset
4. สามารถต่อโคมไฟ Corridor Light
5. ขนาด 70 X 114 X 25 mm.
6. ใช้ร่วมกับชุดควบคุม COMMAX, Nurse Call System Master Station JNS12-72

WIRING DIAGRAM

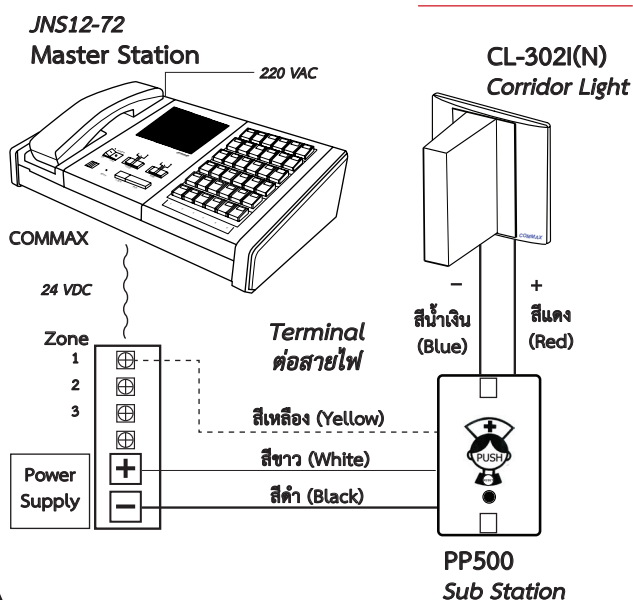

การติดตั้งอุปกรณ์ PP500

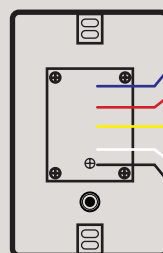

- ① Corridor Light - สายไฟสีน้ำเงิน
- ② Corridor Light + สายไฟสีแดง
- ③ Zone สายไฟสีเหลือง
- ④ Power Supply + สายไฟสีขาว
- ⑤ Power Supply - สายไฟสีดำ

- ① สายไฟสีน้ำเงิน สำหรับต่อ Corridor Light -
 - ② สายไฟสีแดง สำหรับต่อ Corridor Light +
 - ③ สายไฟสีเหลือง สำหรับต่อ Zone
 - ④ สายไฟสีขาว สำหรับต่อ +
 - ⑤ สายไฟสีดำ สำหรับต่อ -
- Output
- Input